

Betjeningspanel (bilde)



Betjeningspanel funksjoner

Dokument
håndtering

Side
editering

Bokmerke

Innstillinger

Help

Dokument
mode/
Fremvisnings
metode

Virtuelt X/Y
Mode &
Roter virtuelt
X/Y

Zoom inn

Forrige
avsnitt

Forrige
side

Neste
avsnitt

Zoom ut

Forrige
setning

Play /
pause

Neste
setning

Neste
skjerm med
tekst

Forrige
ord og
staving

Neste
side

Neste ord
og staving

Ta bilde

Avbryt


Ta flere
bilder

Tilkobling av betjeningspanel og "Touch" versjon

For å koble til tastaturet, ta tak i enden (USB kontakter) av tastaturets kabel. På den finnes det en taktil forhøyning. Vend den mot deg og skyv den inn i en av de 2 øverste USB porten (4 USB kontakter). Kontakten ligger på høyre side av ReadEasy Move, 4 cm fra bunnen og ca 6 cm fra fronten av ReadEasy Move.

Spesialmusen har også en taktil forhøyning. Pass på at denne kontakten plasseres på raden under slik at ikke forhøyningene kommer i veien for hverandre.

Om du har mulighet bruk alltid DVI kontakten når du skal koble ReadEasy Move til en skjerm. Dette gir best bildekvalitet.

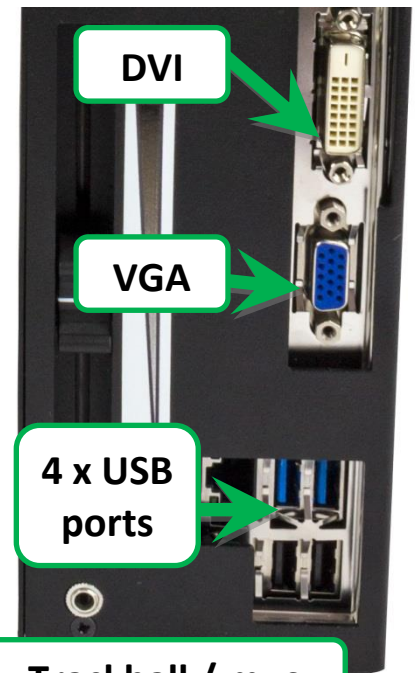

Trackball / mus kontroll for "Touch" versjon

Brukes sammen med skjerm for å bevege seg rundt i dokumenter.

Venstre knapp

Enkelt klikk – brukes for å stoppe lesing og for å aktivere nedtrekks menyvalg


Double klikk – brukes for å starte lesing fra et spesifikt sted og for å velge menyvalg.

Høyre knapp

Reservert for fremtidig bruk.

Frem og tilbake en skjermside

De to knappene tillatter deg å bevege deg frem eller tilbake en side skjermttekst om gangen.

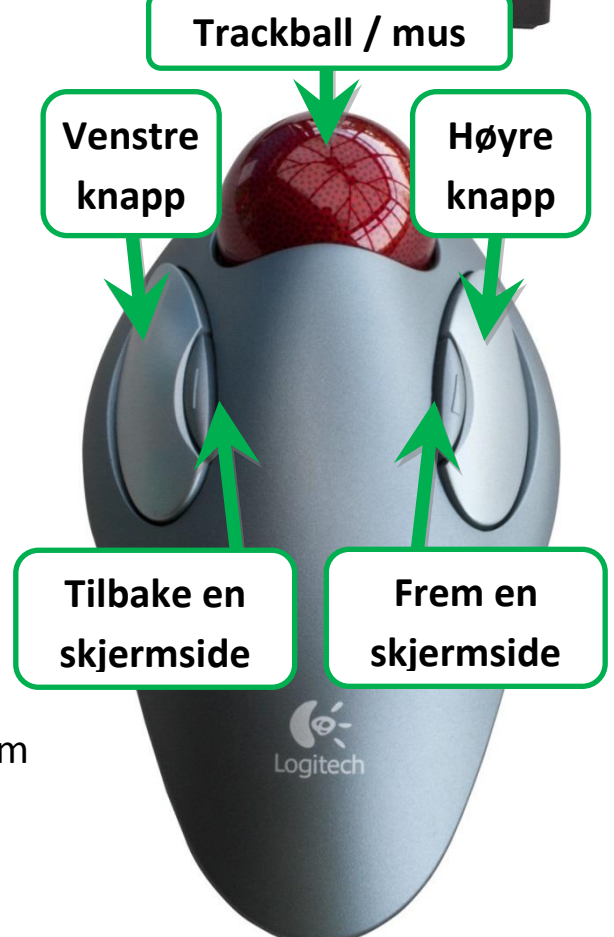

“Touch” versjon



Start opplesing / meny aktivering

Trykk 2 ganger: på skjermen for å aktivere les fra ord i dokument eller velge funksjon i verktøy meny.



Stopp opplesing / verktøylinje bruk

Trykk 1 gang: på skjermen for å stoppe lesing fra dokument eller aktivere meny (ikon) funksjon på skjermen.



Naviger rundt i dokument

Dra fingeren over skjermen: for å flytte deg rundt i dokumentet. Hold fingeren på skjermen i hele bevegelsen.



Zoom inn / ut

Bruke tommel og pekefinger samtidig på skjermen. Beveger du tommel og pekefinger fra hverandre forstørrer du og beveger du dem mot hverandre forminsker du.

Husk at du i hele bevegelsen er nær skjermen.

Bruk gjerne en finger på hver hand om du synes det er lettere.

