

ReadEasy Move

Hurtig guide

Oppsett og uttak av kamera

1)



2)



3)




Betjening

Hurtigere

Trykk hurtig: Forrige setning
Trykk og hold: Forrige avsnitt

Trykk hurtig: Neste setning
Trykk og hold: Neste avsnitt

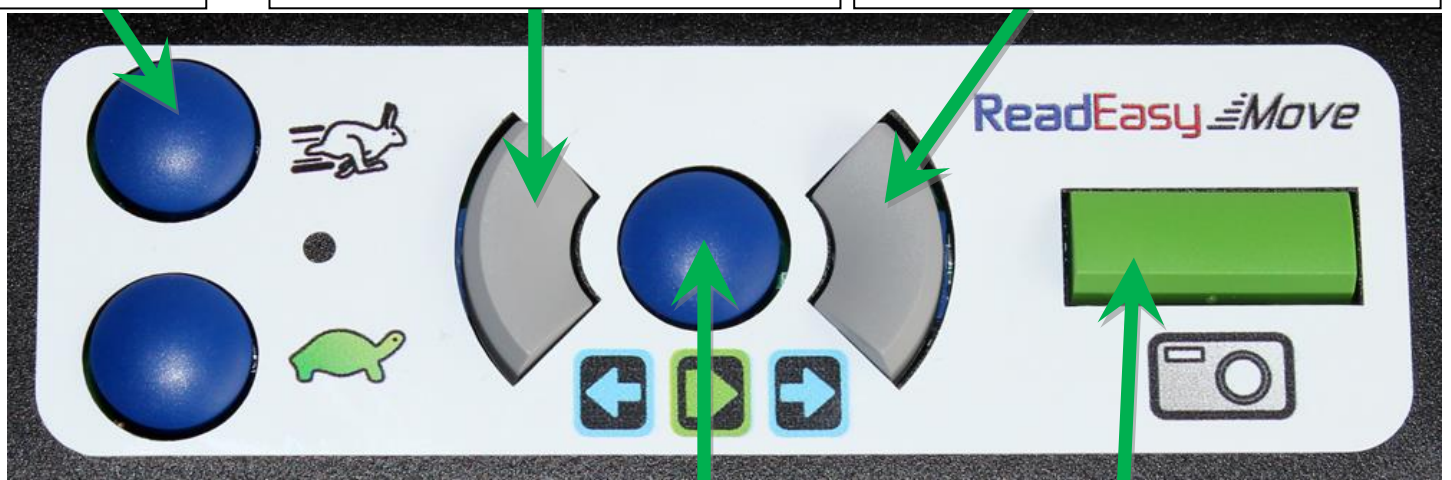

Saktere

Trykk hurtig: Play / Pause
Trykk og hold: Batteri status

Trykk hurtig: Ta bilde
Trykk og hold: Ta bilde av enkelt kolonne (bankuttak ol)

Hurtigere & saktere samtidig:
Bytt stemme

På / av, volum og hodetelefon kontakt

For å øke eller redusere volum kun flytt volum kontrollen (skyvemeter). Dette finner du på høyre kortside sentrert på midten.

For å slå av/på ReadEasy Move trykk kun på den taktile opphøyde knappen øverst på høyre kortside.

For å bruke hodetelefoner bare plugg dem inn i hodetelefonuttaket (minijack 3,5 mm). Dette finner du på høyre kortside 2 cm fra fronten og 2 cm fra bunnen.

På / av

Volum

Hodetelefon
uttak

Hvis du har noen spørsmål angående produktet kontakt Tagarno Norge AS.

Distributør: Tagarno Norge AS, Pilestredet 75 C, 0354 Oslo

Tlf: 23215588, beskjed@tagarno.no , www.tagarno.no

TAGARNO
seeing solutions

Designed and Manufactured by

VisionAid International Ltd **Telefon:** +44 (0)1775 711 977

Bridge Lodge,
Spalding Common
Spalding, Lincolnshire, PE11 3AU
England

Email: sales@visionaid.com

